

Wir freuen uns, dass Sie sich und Ihrem Gehör etwas Gutes getan haben. Ihr **bachmaier** Gehörschutz ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Damit Sie die Vorteile dieses hochwertigen Produkts möglichst lange nutzen können, möchten wir Ihnen einige wertvolle Tipps geben.

## **bachmaier silence ist der ideale Schutz in Freizeit und Beruf – ein Schutz für viele Situationen.**

### Die richtige Anwendung

Überprüfen Sie vor Gebrauch ob Ihr Gehörschutz sauber ist. Fassen Sie mit Daumen und Zeigefinger den Griff und drehen Sie den **bachmaier silence** mit leichtem Druck in die Ohrmuschel bis er bequem sitzt.

**WICHTIG: Der Gehörschutz mit der roten Markierung gehört in das rechte Ohr!**



### Aufbewahrung und Pflege

Bewahren Sie den Gehörschutz in dem mitgelieferten Etui auf. Reinigen Sie den **bachmaier silence** nach jedem Tragen. Waschen Sie den Gehörschutz mit Wasser **ohne** Seife. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Weitere Angaben können vom Hersteller angefordert werden. Spezielle Reinigungsmittel zur hygienischen Reinigung des Gehörschutzes mit **oto-fresh®** erhalten Sie bei Ihrem Hörgeräte-Akustiker.

### Nutzungshinweis

Wenn diese Empfehlungen nicht eingehalten werden, kann die Schutzwirkung von **bachmaier silence** erheblich beeinträchtigt werden. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, den Gehörschutz entsprechend diesen Hinweisen einzusetzen und zu pflegen.

Der Gehörschutz **bachmaier silence** erreicht seine Schutzwirkung nur, wenn Sie ihn sorgfältig handhaben und im Lärm ohne Unterbrechung tragen. Wenn Sie ihn im Lärm auch nur für kurze Zeit aus dem Ohr nehmen, gefährden Sie Ihr Gehör.

Lassen Sie den Sitz vom Akustiker regelmäßig überprüfen. Veränderungen, zum Beispiel durch starke Gewichtszu- oder -abnahme, können die Abdichtung verschlechtern. Der Gehörschutz sollte dann ersetzt werden.

Der Gehörschutz **bachmaier silence** ist ein individuell angefertigter Gehörschutz. Er hat die Baumusterprüfung nach DIN EN 352-2 beim Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitssicherheit - BIA - St. Augustin, Deutschland unter der Prüfnummer 2003 23023 bestanden.

### Technische Daten EN 352-2: 1993

Frequenz in Hz	Mittelwert der Schalldämmung in dB	Standardabweichung in dB	Angenommene Schutzwirkung APV in dB
125	20,0	5,7	14,3
250	19,0	5,7	13,3
500	19,8	5,4	14,4
1000	22,8	4,6	18,2
2000	31,0	4,3	26,7
4000	34,4	4,4	30,0
8000	34,9	5,6	29,3



**bachmaier ist europaweiter Spezialist für maßgefertigten Gehörschutz.**

Unter folgender Anschrift erhalten Sie weitere Informationen:  
**bachmaier · im reichfeld 4 · D-83486 ramsau**