


Wir freuen uns, dass Sie sich und Ihrem Gehör etwas Gutes getan haben. Der bachmaier Gehörschutz ist auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt. Damit Sie die Vorteile dieses hochwertigen Produkts möglichst lange nutzen können, möchten wir Ihnen einige wertvolle Tipps geben.

Lärmschutz shooter

Der maßgefertigte Gehörschutz in Conchaform ist bestens für Schützen geeignet, er reagiert auf Impulsärm automatisch.


Per Tastendruck lassen sich 2 Stufen mit unterschiedlicher Dämmeigenschaft einstellen. Am Potentiometer (Lautstärkesteller) lässt sich das Gerät an und aus, sowie laut und leise stellen. Betrieben wird der Gehörschutz mit einer Hörgerätebatterie der Größe 312.

bachmaier liefert den Gehörschutz mit dem Cerumenschutzsystem HF2. Wir empfehlen eine Reinigung nach jedem Tragen mit oto-fresh® Reinigungstücher. Fragen Sie Ihren Akustiker nach Reinigungsartikeln und Ersatzsiebe des HF2-Filters.

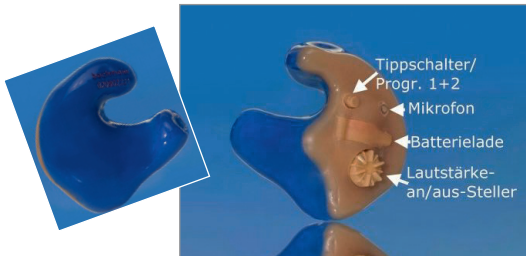

Technische Daten

Eingang/Ausgang Diagramm

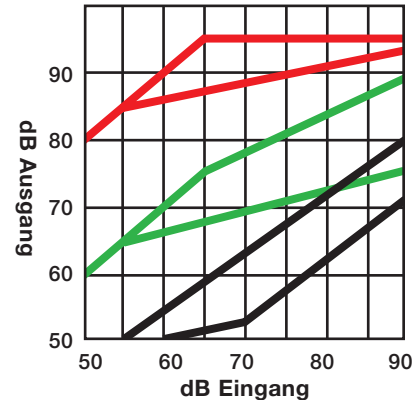

- Lautstärke minimal
- Lautstärke mittel
- Lautstärke maximal



Unter folgender Anschrift erhalten Sie weitere Informationen:

bachmaier · im reichlfeld 4 · D-83486 ramsau