




## MultiFix

... für Ex-Hörer-Systeme

# bachmaier

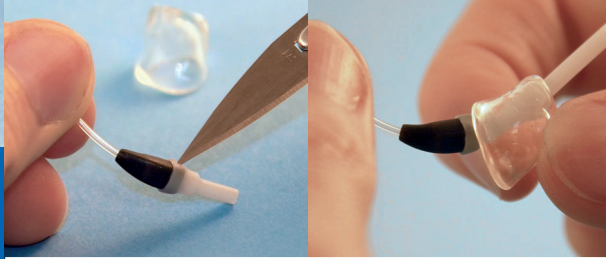

1. Silikonschlauch mit großer Öffnung über den Hörer ziehen. Mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren.

2. Silikonschlauch in die Oto-plastik einziehen und in die optimale Position bringen.


3. Schlauch mit wenig Kleber am Gehörgangsende fixieren.

gut hören – gut aussehen  
[www.bachmaier.de](http://www.bachmaier.de)

**bachmaier, der Spezialist für:**

- Ex-Hörer und Slimtube-Otoplastiken
- weich-flexible Otoplastiken
- Kinder-Otoplastiken
- Sonderanfertigungen
- maßgefertigten Gehörschutz und vieles mehr

Art-Nr. 8236/10.09 Rev. 0 · ©bachmaier

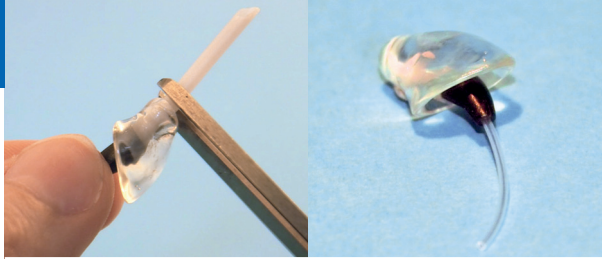

**4. Überstehenden Schlauch  
bündig abschneiden.**

**5. Fertiges Produkt.**

## **Auswechseln von MultiFix**

Mit einem passenden Fräser den Schlauch aus der Otoplastik entfernen.

Dann die Schritte 1–4 wiederholen.

**MultiFix** eignet sich besonders für den C-Guard, C-Grid, Cerutech und Cerustop.